


Testset für die Bluttupfer

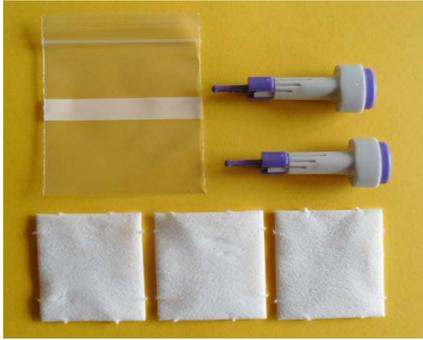


2 Sterile Einmalstechhilfen

3 Zellstofftupfer

1 Plastiksäcklein für die Tupfer

(Bitte mit dem Namen des Tieres beschriften)

Anleitung:

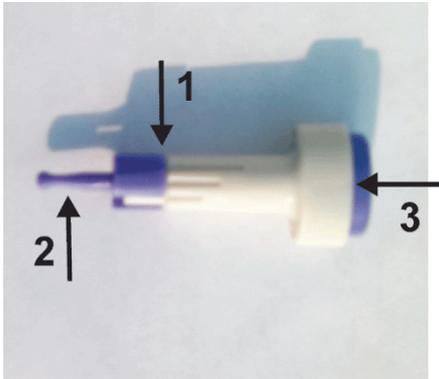

1. Einmalstechhilfe auf die grösste Stufe drehen

2. Schutzkappe leicht nach rechts drehen und entfernen

Die Einmalstechhilfe ist nun bereit und kann mit dem drücken auf siehe 3 ausgelöst werden.




Am besten geht es in der Mitte des Innenohres.

Mit einem Finger auf der Aussenseite des Ohres Gegendruck geben. Die Einmalstechhilfe gut dagegen drücken und auslösen.

Am Ohr kommt eher wenig Blut und es braucht etwas Geduld bis Blut kommt.

Dann mit den Tupfer das Blut entnehmen. Pro Tupfer reicht ein Tropfen.

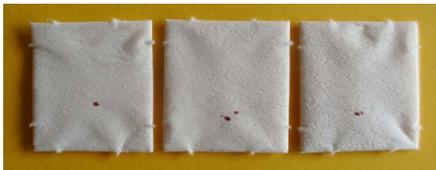

So wenig Blut reicht zum Testen.

Kosten CHF 10.00 pro Set

Bestellen per [E-Mail](#) oder Telefon 076/ 579 28 70